


PIIMAPROOVI VÕTMINE

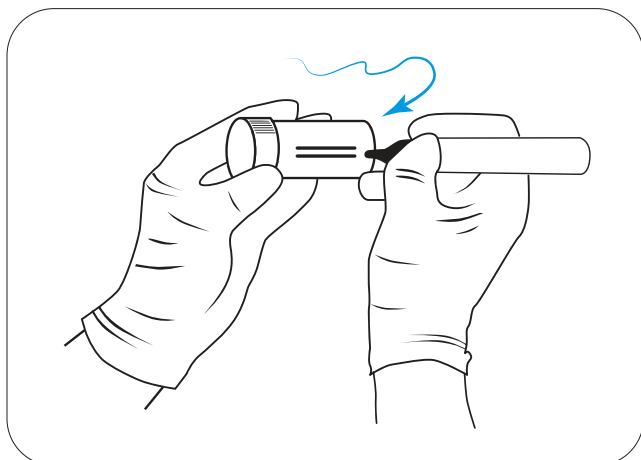


1. Märkige proovitops

Märkige topsile lehma identifitseerimisnumber, udaraveerand ja proovi võtmise kuupäev. Kandke puhtaid kindaid.




2. Puhastage nisa

Puhastage iga nisa ots udaralapi või 17% metanoolis immutatud vatipadjaga. Puhastage nisa, kuni uus lapp/vatipadi jääb puhtaks.

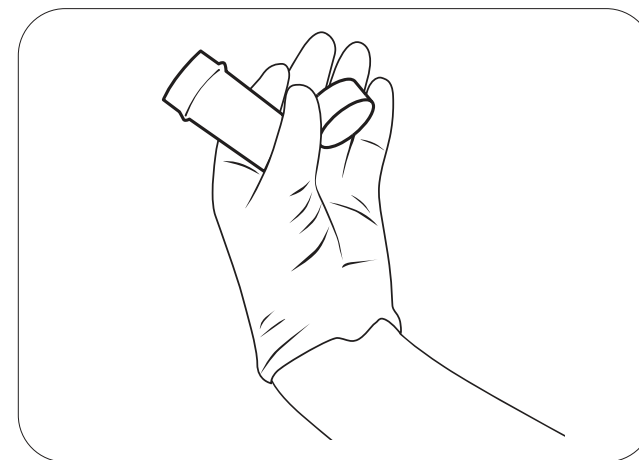


3. Valmistage proovitops ette

Eemaldage topsilt kaas. Jälgige hoolikalt, et te ei puutuks topsi ega kaane sisemust. Hoidke proovitopsi kaant põidla ja sõrme vahel.

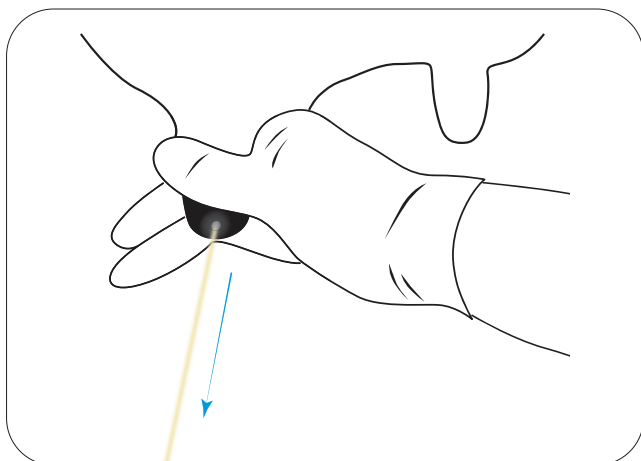


4. Visake ära esimesed 2-3 sortsu piima

Lüpske lehmal 2-3 sortsu piima, visake saadud piim ära.

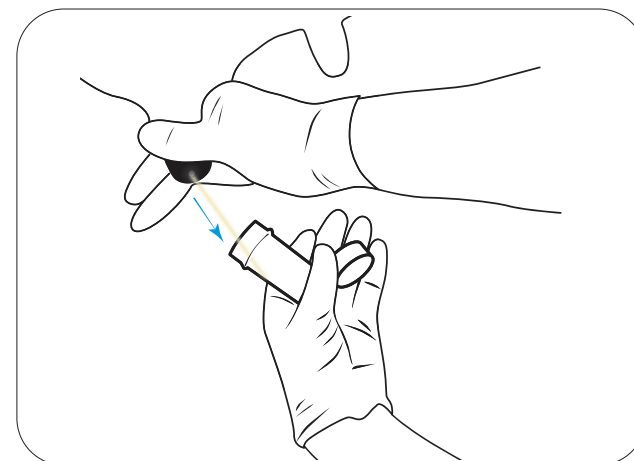

5. Võtke piimaproov

Hoidke proovitopsi 45° nurga all ja täitke tops poolenisti piimaga. Sulgege tops kaanega.

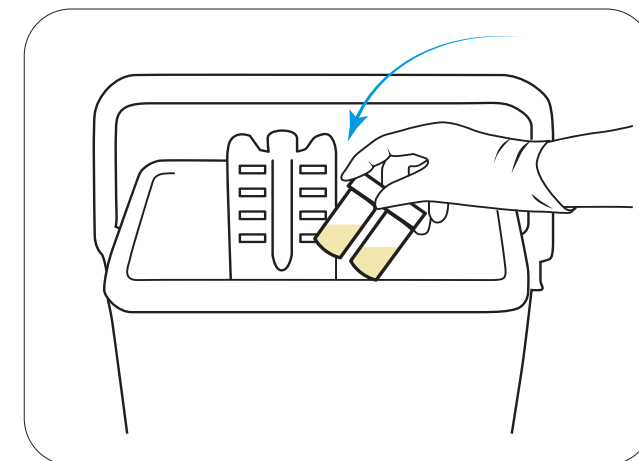

6. Alustage testi või külmutage proov

Testige proovi samal päeval või külmutage proov ja testige seda hiljem.