



MASTATEST® TESTI ALUSTAMINE

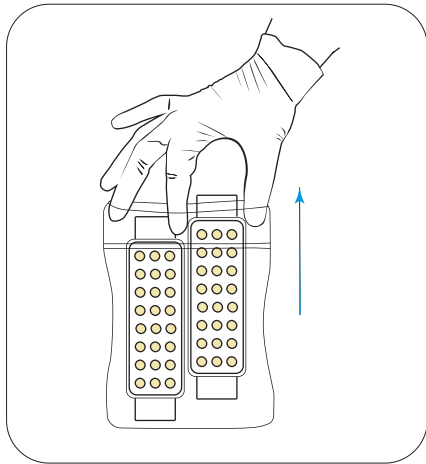


1. Võtke kassett pakendist

Avage kassettide pakend. Kandke puhtaid kindaid.

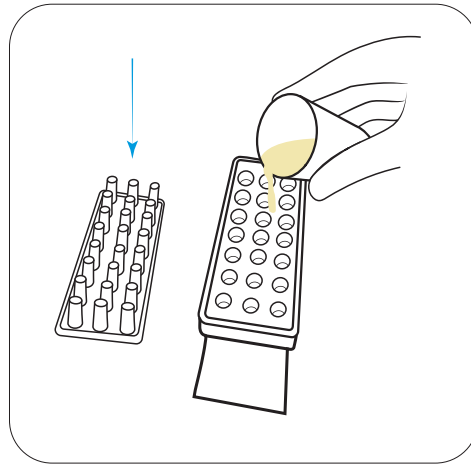


2. Valage piimaproov kassetti

Eemaldage kassett kaas ja asetage kaas tagurpidi pööratuna puhtale tööpinnale. Veenduge, et te ei puutuks kaane sisemist kolbidega osa.

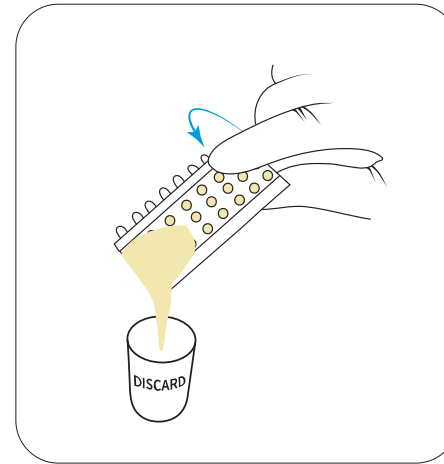


3. Valage üleliigne piim ära

Visake üleliigne piim ära. Ärge valage üleliigset piima tagasi proovi hulka.

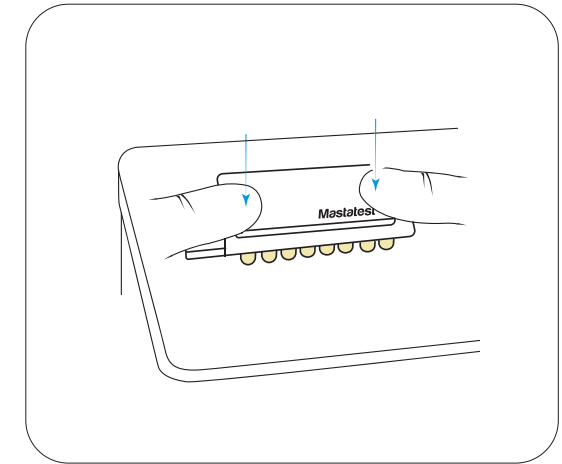


4. Sulgege kaas

Sulgege kassett kaanega, veendudes, et kaas on kasseti keskel. Suruge kaas korralikult kinni.

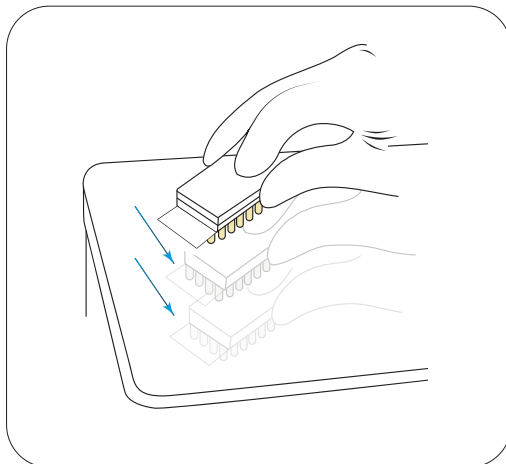

5. Koputage kassetti

Koputage kassetti tugevalt kaks korda.

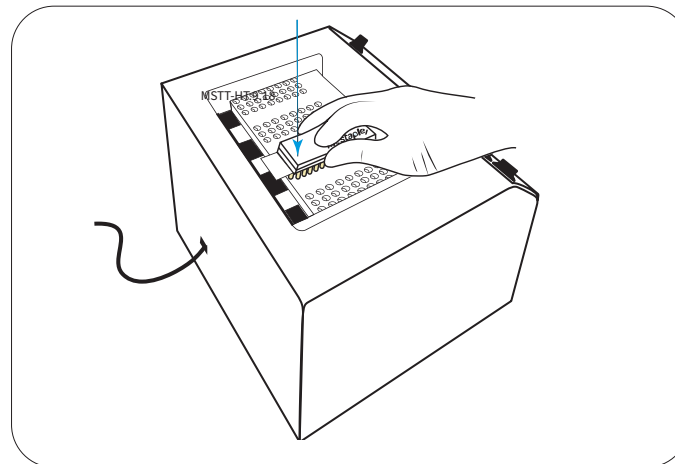

6. Asetage kassett testpessa

Asetage kassett Lapbox seadme testpessa. Jälgige, et QR-koodiga silt jääks alla ja seadme tagumise seina poole.



7. Alustage testi

Sisestage lehma identifitseerimisnumber, kasutades pööratavat nuppu. Testi alustamiseks vajutage nuppu. Tulemused saadetakse 24 tunni jooksul teie meile.